


病毒檢體採樣刷(組)(口腔細胞/咽喉分泌物)

產品型號：

30501.4 單支滅菌包裝 / 32501.4E 採檢棒 + 空白運送試管 / UTM-32501.4 採檢棒 + UTM保存液試管

規格要件：(樣式參閱圖)

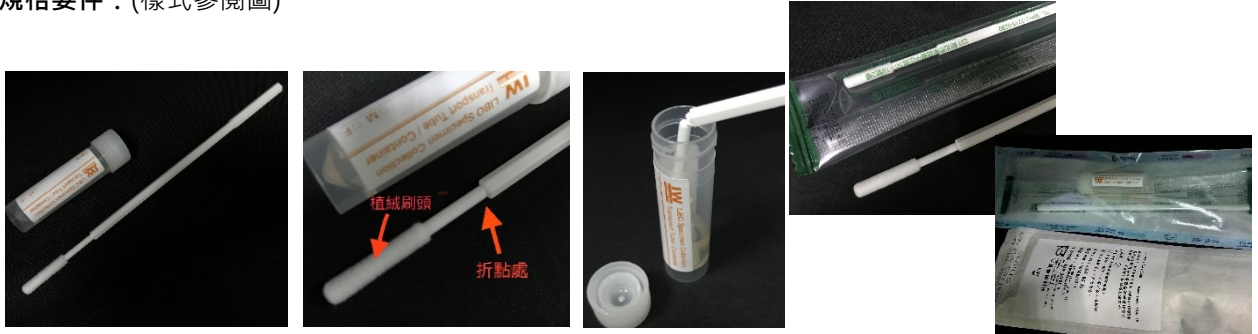

採檢步驟

1. 撕開滅菌包裝袋，取出採檢刷。
2. 將採檢刷之植絨部刷頭往咽喉部或口腔內側臉頰左、右各上下來回刷取數次即完成採檢。完成後可將採檢刷棒體前端之折點處，折斷於所附之保存管，方便寄送，並儘快送至實驗室進行檢測。

用途及性能:

本耗材提供植絨採樣刷頭,能較大範圍採取所需檢體。簡易的方式讓受測者在無壓力的情形下收集其口腔或咽喉細胞分泌物等檢體。各式不同型刷頭及棒體可依客戶需求製作。

注意事項:

1. 本耗材已滅菌，有效日期標印於包裝袋,常溫保存
2. 本耗材包裝如有破損，請勿使用，單次使用之器材，不得重覆使用

以0.22um membrane filter 無菌過濾 (Millipore Steritop™ Filter Units)

H ₂ O
HEPES
NaH ₂ PO ₄
KCl
CaCl ₂
MgSO ₄ .7H ₂ O
Sucrose
L-glutamic acid
BSA
Vancomycin
Colistin
Amphotericin B
phenol red
pH 7.0~7.5 at 25°C

UTM 保存液成分說明

適用於一般常見臨床檢驗實驗室之操作流程，包括Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, 或其他病毒檢驗等。使用之前可儲存於2 ~ 25°C。使用之前切勿冷凍儲存。為了達到最佳之病原體後續培養檢測效果，於採檢後建議冷藏於2 ~ 8°C；若需長期保存檢體，建議於採檢後冷凍儲存於 -20°C以下。

廠商名稱:艾爾威生物科技有限公司
 藥商地址:新北市新店區中正路501-18號2樓
 製造廠名稱:臺灣立寶醫學器材有限公司
 TEL : 02-2218-0280 www.iwbt.com.tw